

제품 설명서 *본 제품은 의료기기임, 일회용 멸균의료기기(재사용 금지)

모델명: Micross **품목명:** 수동식의료용골 수입품목신고번호: 서울 수신 06-674호

포장단위: 1 pcs **제조원:** C.G.M. S.P.A. Division. Medicale META

수입자: (주) 가이스트리히코리아 / 서울특별시 서초구 강남대로 51길 1 (서초동) 5층

사용목적: 자연 치아 상실로 인해 인공치아로 대체하려 할 때, 수복 부위의 잔존 치조골의 일부 결손 및 파절을 보완하여 주기 위해 환자 악골의 다른 곳의 풍부한 뼈를 일부 채취(Scraping)할 때 쓰이는 의료용 골이다.

사용방법: 1) 캐놀러(cannula)의 몸체 위에 있는 마크가 조작자를 향하게 하여 기구를 잡는다. 2) 골 표면 위에 기구의 앞쪽 끝(날)을 밀어서 골을 채취한다. 3) 5도와 50도 사이의 작업 각도에 의해, 골은 평평한 표면부터 움푹 들어간 표면까지 채취할 수 있다. 4) 채취한 뼈의 밀도와 양을 바꾸기 위해 각도와 압력을 변화시킨다. 5) 채취된 골을 이용하기 위해, 살균한 볼 위에 기구를 놓고, lever를 풀고 완전히 열릴 때까지 기구의 핸들을 앞으로 천천히 움직인다. 탱크로부터 자가분을 제거하기 위해 살균된 기구를 사용할 것. 6) 골을 더 채취하기 위해서, 원래 있던 자리에 핸들을 놓고 lever를 잠근다.

사용시 주의사항: 사용하기 전에 포장에 손상이었는지 확인할 것. 이 기구는 오로지 자격이 있는 외과 staff에 의해 사용되어야 한다. 이 기구를 사용할 때는 멸균 장갑을 착용하고 날의 날카로운 가장자리가 그 장갑을 뚫 수 있으니 유의할 것. 외과의는 환자가 골 이식에 적합인지 확인 하고 감염의 위험을 방지하기 위하여 모든 골 이식 절차에 관련된 합병증과 필요한 예방 조치를 취해야 한다. (작성년월: 2024년 1월)

부작용 보고 관련 문의처 (한국의료기안전정보원, 대표전화: 1588-4183)

Geistlich